



Questo documento è proprietà di TECNO-GAZ S.p.A. Esso non può essere copiato, riprodotto o mostrato a terzi senza l'autorizzazione scritta di TECNO-GAZ S.p.A.  
This document is property of TECNO-GAZ S.p.A. It cannot be copied, reproduced or shown to third without written authorization of TECNO-GAZ S.p.A.

CODICE TECNO-GAZ	app/software	PAX-I	PAX-I SMART	PAX-I GREEN	Easydent v4	EzDent-i	TECNO-GAZ / Vatech need/necessitano	TECNO-GAZ / Vatech provide/ consegnano	License application
X2004PXI	AUTOFOCUS	X			X	X	Unit SN	encrypt.enc (encrypt.dat)	Encrypt.enc has to be applied by VKeyGen app stored in C:\VCaptureSWUtils\VKeyGen. ----- Encrypt.enc deve essere salvato con VKeyGen app che si trova in C:\VCaptureSWUtils\VKeyGen Encrypt.enc
SS016000	MAGIC PAN		X	X	X	X	Unit SN	encrypt.enc (encrypt.dat)	Encrypt.enc has to be applied by VKeyGen app stored in C:\VCaptureSWUtils\VKeyGen. ----- Encrypt.enc deve essere salvato con VKeyGen app che si trova in C:\VCaptureSWUtils\VKeyGen Encrypt.enc
SS084000	DICOM for EzDent-i	X	X	X		X	vtnl.vdb exported from license USB key	es_xx_xx.lup	Connect USB license key to the PC, launch VTNL.exe and click File > Export vtnl. New file VTNL.vdb will be created in root of USB key. Send VTNL.vdb file to your Vatech sales manager with request for license upgrade. After delivery of new license file es_xx_xx.lup from Vatech please deactivate actual EzDent-i or Ez3D-i licence, import delivered file to VTNL.exe - click File > Import lup and activate EzDent-i or Ez3D-i again from the USB license key. ----- Collegare chiave di licenza USB delle licenze Ezdent -i / Ez3D-i al PC, lanciare VTNL.exe e fare clic su File> Esporta vtnl. Nuovo file VTNL.vdb verrà creato nella radice della chiave USB il file VTNL.vdb. Invia file di VTNL.vdb al vostro responsabile vendite Vatech con richiesta di aggiornamento della licenza. Dopo la consegna del nuovo es_xx_xx.lup file di licenza da Vatech si prega di disattivare attuale EzDent-i o Ez3D-i di licenza, l'importazione di file consegnato a VTNL.exe - fare clic su File> Importa lup e attivare EzDent-i o Ez3D-i di nuovo dalla licenza USB chiave.
SS076000	EZ-CODI	X	X	X		X	vtnl.vdb exported from license USB key	es_xx_xx.lup	Connect USB license key to the PC, launch VTNL.exe and click File > Export vtnl. New file VTNL.vdb will be created in root of USB key. Send VTNL.vdb file to your Vatech sales manager with request for license upgrade. After delivery of new license file es_xx_xx.lup from Vatech please deactivate actual EzDent-i or Ez3D-i licence, import delivered file to VTNL.exe - click File > Import lup and activate EzDent-i or Ez3D-i again from the USB license key. ----- Collegare chiave di licenza USB delle licenze Ezdent -i / Ez3D-i al PC, lanciare VTNL.exe e fare clic su File> Esporta vtnl. Nuovo file VTNL.vdb verrà creato nella radice della chiave USB il file VTNL.vdb. Invia file di VTNL.vdb al vostro responsabile vendite Vatech con richiesta di aggiornamento della licenza. Dopo la consegna del nuovo es_xx_xx.lup file di licenza da Vatech si prega di disattivare attuale EzDent-i o Ez3D-i di licenza, l'importazione di file consegnato a VTNL.exe - fare clic su File> Importa lup e attivare EzDent-i o Ez3D-i di nuovo dalla licenza USB chiave.
SS082000	EZ-SMART	X	X	X		X	Unit SN	file .Exe	file for installation of EZ-smart ----- file d'installazione dell'EZ-SMART
SS077000	ADDITIONAL LICENSE EzDent-i	X	X	X		X	vtnl.vdb exported from license USB key AND NUMBER OF LICENSE	es_xx_xx.lup	Connect USB license key to the PC, launch VTNL.exe and click File > Export vtnl. New file VTNL.vdb will be created in root of USB key. Send VTNL.vdb file to your Vatech sales manager with request for license upgrade. After delivery of new license file es_xx_xx.lup from Vatech please deactivate actual EzDent-i or Ez3D-i licence, import delivered file to VTNL.exe - click File > Import lup and activate EzDent-i or Ez3D-i again from the USB license key. ----- Collegare chiave di licenza USB delle licenze Ezdent -i / Ez3D-i al PC, lanciare VTNL.exe e fare clic su File> Esporta vtnl. Nuovo file VTNL.vdb verrà creato nella radice della chiave USB il file VTNL.vdb. Invia file di VTNL.vdb al vostro responsabile vendite Vatech con richiesta di aggiornamento della licenza. Dopo la consegna del nuovo es_xx_xx.lup file di licenza da Vatech si prega di disattivare attuale EzDent-i o Ez3D-i di licenza, l'importazione di file consegnato a VTNL.exe - fare clic su File> Importa lup e attivare EzDent-i o Ez3D-i di nuovo dalla licenza USB chiave.



Questo documento è proprietà di TECNO-GAZ S.p.A. Esso non può essere copiato, riprodotto o mostrato a terzi senza l'autorizzazione scritta di TECNO-GAZ S.p.A.  
This document is property of TECNO-GAZ S.p.A. It cannot be copied, reproduced or shown to third without written authorization of TECNO-GAZ S.p.A.

CODICE TECNO-GAZ	app/software	PAX-I	PAX-I SMART	PAX-I GREEN	Easydent v4	EzDent-i	TECNO-GAZ / Vatech need/necessitano	TECNO-GAZ / Vatech provide/ consegnano	License application
SS078000	ADDITIONAL LICENSE Ez3D-i	X	X	X		X	vtnl.vdb exported from license USB key AND NUMBER OF LICENSE	es_xx_xx.lup	<p>Connect USB license key to the PC, launch VTNL.exe and click File &gt; Export vtnl. New file VTNL.vdb will be created in root of USB key. Send VTNL.vdb file to your Vatech sales manager with request for license upgrade.</p> <p>After delivery of new license file es_xx_xx.lup from Vatech please deactivate actual EzDent-i or Ez3D-i licence, import delivered file to VTNL.exe - click File &gt; Import lup and activate EzDent-i or Ez3D-i again from the USB license key.</p> <p>-----</p> <p>Collegare chiave di licenza USB delle licenze Ezdent -i / Ez3D-i al PC, lanciare VTNL.exe e fare clic su File&gt; Esporta vtnl. Nuovo file VTNL.vdb verrà creato nella radice della chiave USB il file VTNL.vdb. Invia file di VTNL.vdb al vostro responsabile vendite Vatech con richiesta di aggiornamento della licenza. Dopo la consegna del nuovo es_xx_xx.lup file di licenza da Vatech si prega di disattivare attuale EzDent-i o Ez3D-i di licenza, l'importazione di file consegnato a VTNL.exe - fare clic su File&gt; Importa lup e attivare EzDent-i o Ez3D-i di nuovo dalla licenza USB chiave.</p>
SS012000	Dicom print Easydent4	X	X	X	X		PC MAC address	License code + xxxxxxxxxxxx.dat file	<p>EasyDent4 DP patch has to be installed. Please copy .dat file to C:\Easydent4\Edpv4. Launch from PC desktop "License for EzDicomPrint" apply the delivered license code and choose .dat file from C:\Easydent4\Edpv4 folder.</p>
SS003000	ADDITIONAL LICENSE Ez3D PLUS (EZ 3D upgrade licenza Professional 1+1 to Professional 1+5)		X	X	X		V2C file + PC MAC address	xxxx.V2C	<p>run the "rus.exe"at c:\Ez3D2009\bin then export file then you get the .V2C file. Please apply it</p>
SS013000	AnyGate	X	X	X	X	X	PC MAC address	License code	<p>AnyGate sw has to be installed and applied license code delivered by Vatech.</p>
SS094000	Twain	X	X	X		X	vtnl.vdb exported from license USB key	es_xx_xx.lup	<p>Connect USB license key to the PC, launch VTNL.exe and click File &gt; Export vtnl. New file VTNL.vdb will be created in root of USB key. Send VTNL.vdb file to your Vatech sales manager with request for license upgrade.</p> <p>After delivery of new license file es_xx_xx.lup from Vatech please deactivate actual EzDent-i or Ez3D-i licence, import delivered file to VTNL.exe - click File &gt; Import lup and activate EzDent-i or Ez3D-i again from the USB license key.</p> <p>-----</p> <p>Collegare chiave di licenza USB delle licenze Ezdent -i / Ez3D-i al PC, lanciare VTNL.exe e fare clic su File&gt; Esporta vtnl. Nuovo file VTNL.vdb verrà creato nella radice della chiave USB il file VTNL.vdb. Invia file di VTNL.vdb al vostro responsabile vendite Vatech con richiesta di aggiornamento della licenza. Dopo la consegna del nuovo es_xx_xx.lup file di licenza da Vatech si prega di disattivare attuale EzDent-i o Ez3D-i di licenza, l'importazione di file consegnato a VTNL.exe - fare clic su File&gt; Importa lup e attivare EzDent-i o Ez3D-i di nuovo dalla licenza USB chiave.</p>
2PXIA0007	EzTwain	X	X	X	X		PC MAC address	License code	<p>EzTwain sw has to be installed and applied license code delivered by Vatech.</p>