

## USO SERVIZIO CLEAN IOT


*Il seguente documento sostituisce il paragrafo 12 del manuale utente.*

Attivare la garanzia prodotto o eseguire l'installazione attraverso App Mobile "TECNO-GAZ".

Collegarsi alla pagina web: **s.tecnogaz.com/clean/** tramite la barra degli indirizzi del browser.



Successivamente si aprirà la seguente schermata:

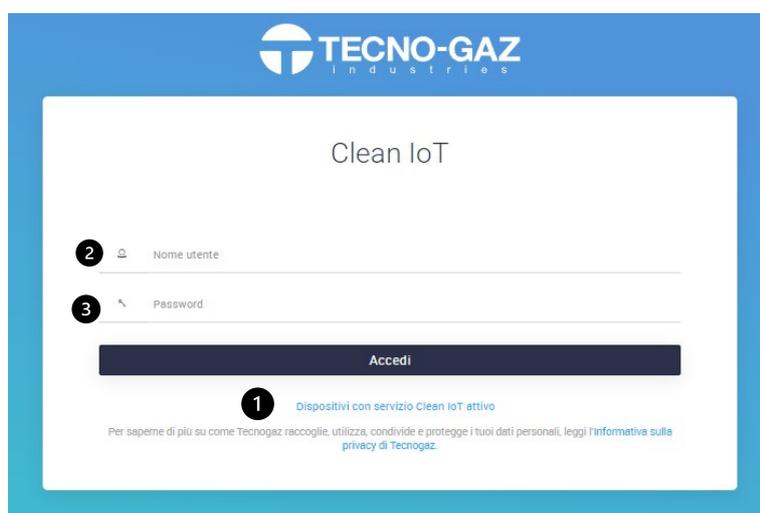

### Servizio Clean IoT da attivare

Se il servizio Clean IoT non è attivato, cliccare "Chiedi l'attivazione del servizio Clean IoT" (1) e seguire le istruzioni.

Quando tutta la documentazione sarà approvata e TECNO-GAZ riceverà quanto richiesto, il servizio Clean IoT sarà attivato.


Non è possibile attivare il servizio senza il completamento della documentazione da accettare e da caricare sul portale.




## Servizio Clean IoT attivato

Inserire nome utente (2) e password (3)

Una volta attivato il servizio, dopo essersi loggati, apparirà la seguente schermata.

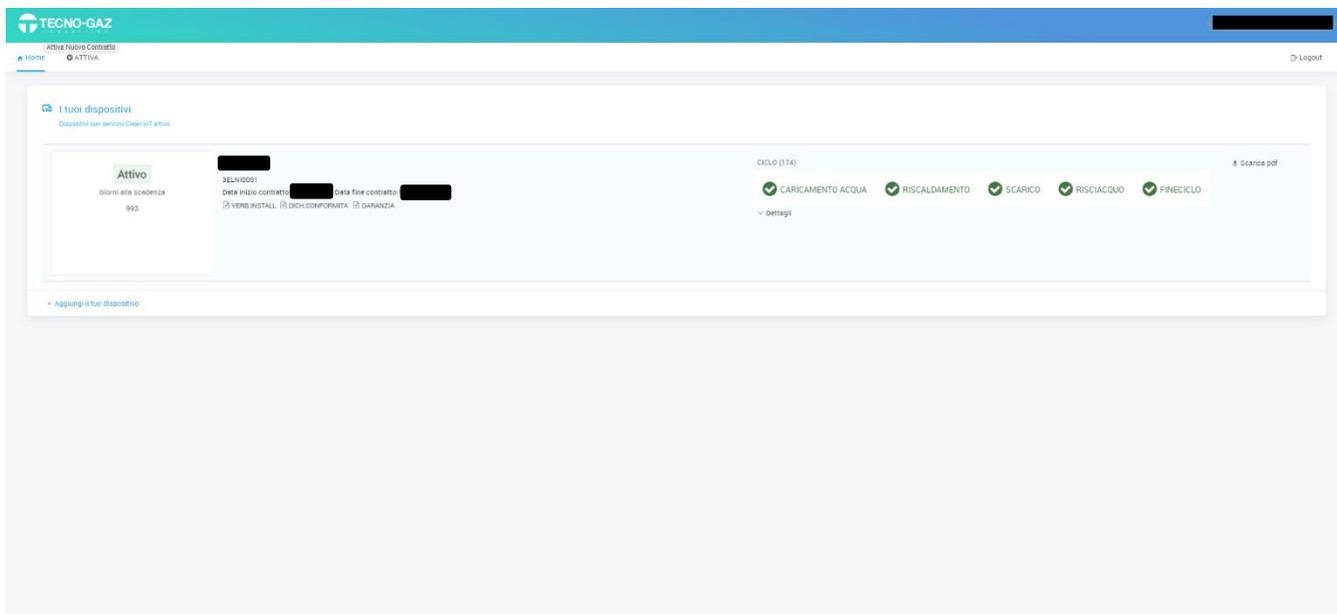

Selezionare "Calendario" per visualizzare i cicli effettuati.

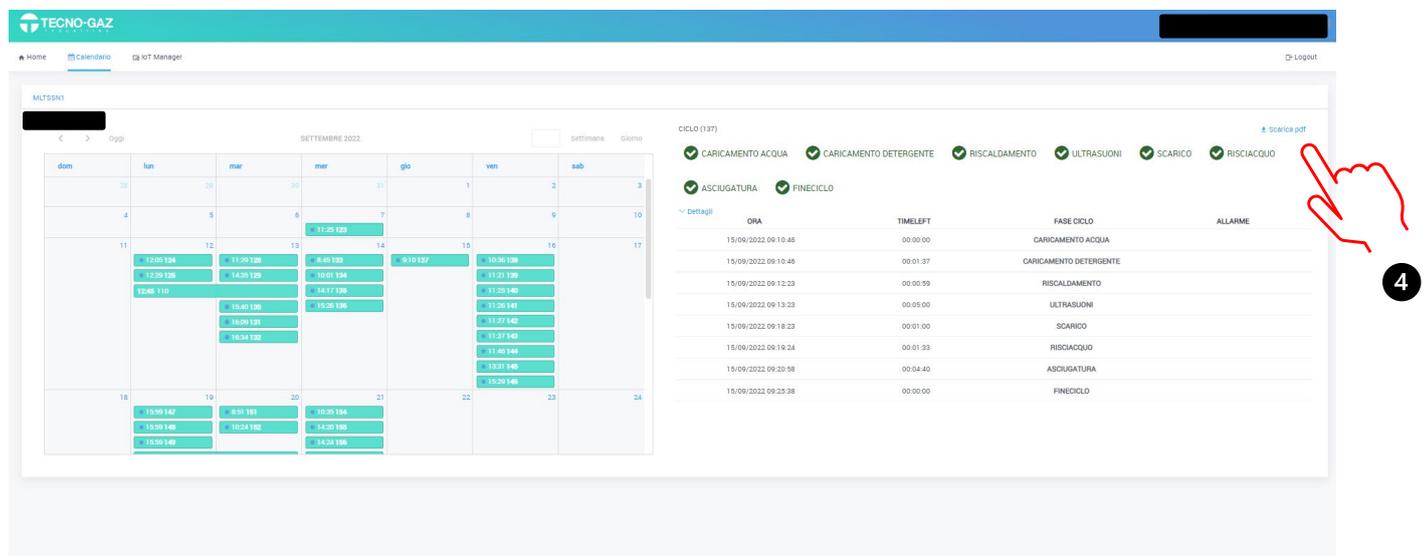

Selezionando un determinato ciclo all'interno di un determinato giorno, è possibile visualizzare nella parte destra l'andamento delle grandezze caratteristiche. Selezionando "Download PDF" è possibile scaricare il file del ciclo in formato PDF (4).